

Numune Çalışma ve Saklama Talimatı

Çok Önemli! Lütfen Dikkatle Okuyunuz!

Sayın Katılımcı,

Programa ait örnekleri bu yazının beraberinde bulacaksınız. Size bu grupta Glukometrede glukoz tayini için **2 Adet 1'er mL Serum örneği** gönderilmiştir.

Numuneler elinize ulaştıktan sonra en kısa sürede çalışmanın yapılmasını öneririz. Hemen çalışma yapılamayacak ise oda ısısında veya soğuk buzdolabında (2-8 °C) dondurmada muhafaza ediniz. Çalışma öncesinde numuneleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletin. Çalkalamadan ve köpürtmeden kaçınınız. Yavaşça alt-üst ederek tamamen homojen hale gelmesini sağlayınız.

Kalite kontrol programından arzu edilen yararların temin edilebilmesi için örnekler, laboratuvara gelen herhangi bir hasta örneği gibi çalışılmalı, analitik işlemler açısından hiçbir farklı uygulamaya tabi tutulmamalıdır.

Metot ve teknikler arasındaki farkı en aza indirmek ve olası dilüsyon hatalarını engellemek amacıyla örnekler liyofilizasyon işlemine tabi tutulmamıştır. Biyolojik kökenli bütün örnekler gibi, bu örneklerin de tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, gereken titizlik gösterilmelidir.

Örneklerden çalışılarak sonuçları bildirilecek parametreler ekteki listede belirtilmektedir. Sonuçların listede verilen birimler kullanılarak girilmesi gerekmektedir.

Program kapsamında elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında yararlı olabileceği düşünüldüğünden, katılımcı laboratuvarların analiz sonuçları ile birlikte, raporlarında kullandıkları referans aralıkları da belirtmeleri istenmektedir. Referans aralıklar **40 yaşındaki erkekler** için verilmelidir.

Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgiyi gözden geçirilmeli ve meydana gelen değişiklikler işlenmelidir. Sonuçların değerlendirilmesi ve laboratuvarların gruplanması açısından büyük önem taşıdığından, özellikle metot, kit ve referans aralık değişikliklerinin sisteme işlenmesine özen gösterilmelidir.

Gönderilen numuneler "Glukometrede glukoz tayini" için özel hazırlanmış olup, bunun dışında herhangi bir amaç için kullanılması uygun değildir.

NOT: Sonuçlarınızı aşağıda belirtilen tarihler arasında girmeniz gerekmektedir. Bu süreler içinde sonuç girilmemesi halinde rapor oluşturulmayacaktır. "GEÇ RAPOR" uygulamamız kaldırılmıştır.

Örnek gönderim tarihi: 12 Şubat 2019

Çalışma süresi: 13 Şubat 2019 – 17 Şubat 2019

Sonuç girişi için son tarih: 22 Şubat 2019 saat 17:00

Son Kullanma Tarihi: 22 Şubat 2019

GPOCT-19 Program İerięi

TEST PARAMETRESİ	BİRİMİ	SONU	
		GPOCT-19-02-01	GPOCT-19-02-02
Glukoz	mg/dL		

Bu form, internetten veri giriři sırasında size kolaylık saęlaması iin dzenlenmiřtir. Ltfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri fakslamayınız, gndermeyiniz.

SONU GİRİřİ



www.labpt.com.tr

Web Sitesi Kullanım Kılavuzu İin

