

# Numune Çalışma ve Saklama Talimatı

**Çok Önemli! Lütfen Dikkatle Okuyunuz!**

Sayın Katılımcı,

Programa ait örnekleri bu yazının beraberinde bulacaksınız. Size bu grupta hormon testleri için **2 Adet 2'şer mL Serum örneği** gönderilmiştir.

Numuneler elinize ulaştıktan sonra buzdolabında dondurmadan muhafaza ediniz. Çalışma öncesinde numuneleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletin ve çalkalamadan, köpürtmeden, alt-üst ederek tamamen homojen hale gelmesini sağlayınız.

Kalite kontrol programından arzu edilen yararların temin edilebilmesi için, örnekler laboratuvara gelen herhangi bir hasta örneği gibi çalışılmalı, analitik işlemler açısından hiçbir farklılık yapılmamalıdır.

Metot ve teknikler arasındaki farkı en aza indirmek ve olası dilüsyon hatalarını engellemek amacıyla örnekler liyofilizasyon işlemine tabi tutulmamıştır. Biyolojik kökenli bütün örnekler gibi, bu örneklerin de tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, gereken titizlik gösterilmelidir.

Örneklerden çalışılarak neticeleri bildirilecek parametreler ekteki listede belirtilmektedir. Neticelerin listede verilen birimler kullanılarak girilmesi gerekmektedir.

Program kapsamında elde edilen neticelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında yararlı olabileceği düşünüldüğünden, katılımcı laboratuvarların analiz neticeleri ile birlikte, raporlarında kullandıkları referans aralıkları da belirtmeleri istenmektedir. Referans aralıklar **40 yaşındaki erkekler** için verilmelidir.

Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgiyi gözden geçirilmeli ve meydana gelen değişiklikler işlenmelidir. Neticelerin değerlendirilmesi ve laboratuvarların gruplanması açısından büyük önem taşıdığından, özellikle metot, kit ve referans aralık değişikliklerinin işlenmesine özen gösterilmelidir.

**NOT: Sonuçlarınızı aşağıda belirtilen tarihler arasında girmeniz gerekmektedir. Bu süreler içinde sonuç girilmemesi halinde rapor oluşturulmayacaktır. "GEÇ RAPOR" uygulamamız kaldırılmıştır.**

---

**Örnek gönderim tarihi:** 12 Şubat 2019

**Çalışma süresi:** 13 Şubat 2019 – 20 Şubat 2019

**Sonuç girişi için son tarih:** 22 Şubat 2019 saat 17:00

**Son kullanma tarihi:** 20 Şubat 2019

**Referans Aralığı:** 40 yaşındaki erkekler için verilmelidir.

---

## H-19 Program İeriĐi

TEST PARAMETRESİ	BİRİMİ	SONU	
		H-19-02-01	H-19-02-02
FSH	mIU/mL		
LH	mIU/mL		
Estradiol	pg/mL		
Prolaktin	ng/mL		
Progesteron	ng/mL		
hCG	mIU/mL		
T3	ng/mL		
T4	µg/dL		
FT3	pmol/L <i>pg/mL x 1,55 = pmol/L</i> <i>pg/dL x 0,015 = pmol/L</i>		
FT4	pmol/L <i>ng/dL x 12,9 = pmol/L</i>		
TSH	µIU/mL		
Vitamin B12	pg/mL		
Folik asit	ng/mL		
Ferritin	ng/mL		
Testosteron (Total)	ng/dL x 0,01 = ng/mL nmol L x 0,288 = ng/mL		
Kortizol	µg/dL		
İnsülin	µIU/mL		
25-OH vitamin D (Total)	ng/mL		
17-OH progesteron	ng/mL		

Bu form, internetten veri giriŐi sırasında size kolaylık saĐlaması iin dzenlenmiŐtir. Ltfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri fakslamayınız, gndermeyiniz.

### SONU GİRİŐİ



[www.labpt.com.tr](http://www.labpt.com.tr)

Web Sitesi Kullanım Kılavuzu İin

