

# Numune Çalışma ve Saklama Talimatı

## Tam İdrar Tahlili (Kimyasal Analiz)

Sayın Katılımcı,

Programa ait örnekleri bu yazının beraberinde bulacaksınız. Size bu grupta idrar tahlili testleri için **2 Adet 4'er mL İdrar örneği** gönderilmiştir. Örneklerin stabilite ve homojenite çalışmaları yapılmıştır.

Stabilite süresi: Oda ısısı 2 gün, +4 derece 5 gün.

**Size bu grupta tam idrar tahlili için 2 örnek gönderilmiştir. Bu örneklerde sadece stripe ölçüm yapılması gerekmektedir. Mikroskopik değerlendirme için ayrıca 5 adet fotoğraf web sayfasına konmuştur. Bu sorular da cevaplandırılmalıdır.**

Numuneler elinize ulaştıktan sonra buzdolabında dondurmadan muhafaza ediniz. Çalışma öncesinde numuneleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletin ve çalkalamadan, köpürtmeden, alt-üst ederek tamamen homojen hale gelmesini sağlayınız.

Kalite kontrol programından arzu edilen yararların temin edilebilmesi için, örnekler laboratuvara gelen herhangi bir hasta örneği gibi çalışılmalı, analitik işlemler açısından hiçbir farklılık yapılmamalıdır.

Biyolojik kökenli bütün örnekler gibi, bu örneklerin de tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, gereken hassasiyet gösterilmelidir. Olası enfeksiyon riski için çalışma sırasında iyi laboratuvar pratiği uygulamaları dikkate alınmalıdır.

Örneklerden çalışılarak neticeleri bildirilecek parametreler ektteki listede belirtilmektedir.

Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgiyi gözden geçirilmeli ve meydana gelen değişiklikler işlenmelidir. Neticelerin değerlendirilmesi ve laboratuvarların gruplanması açısından büyük önem taşıdığından, özellikle metot, kit ve referans aralık değişikliklerinin işlenmesine özen gösterilmelidir.

**NOT: Sonuçlarınızı aşağıda belirtilen tarihler arasında girmeniz gerekmektedir. Bu süreler içinde sonuç girilmemesi halinde rapor oluşturulmayacaktır. "GEÇ RAPOR" uygulamamız kaldırılmıştır.**

---

Örnek gönderim tarihi	: 12 Şubat 2019
Çalışma süresi	: 13 Şubat 2019 – 18 Şubat 2019
Sonuç girişi için son tarih	: 22 Şubat 2019 saat 17:00
Son kullanma tarihi	: 19 Şubat 2019
Stabilite süresi	: Oda ısısı 2 gün, +4 derece 5 gün
Referans aralığı	: <u>40 yaşındaki erkekler</u> için verilmelidir.

**Son sonuç girişi tarihinden itibaren sisteme sonuç girişi yapılamayacaktır.**

**Son giriş tarihine kadar sonuçlarınızı revize edebilirsiniz.**

## TIT-19 Program İeriđi

TEST PARAMETRESİ		SONU	
		TIT-19-02-01	TIT-19-02-02
Dansite	Kantitatif		
pH	Kantitatif		
Lökosit esteraz	Kalitatif		
Nitrit	Kalitatif		
Protein	Kalitatif		
Glukoz	Kalitatif		
Keton	Kalitatif		
Ürobilinojen	Kalitatif		
Bilirubin	Kalitatif		
Eritrosit / hemoglobin	Kalitatif		

Kalitatif sonuçlar için sonuç giriři:

- Negatif
- Sınırdadır
- Pozitif

Bu form, internetten veri giriři sırasında size kolaylık sağlaması için düzenlenmiştir. Lütfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri fakslamayınız, göndermeyiniz.

### SONU GİRİŐİ



[www.labpt.com.tr](http://www.labpt.com.tr)

Web Sitesi Kullanım Kılavuzu İçin

