

Numune Çalışma ve Saklama Talimatı (Biyokimya Programı)

Sayın Katılımcı,

Programa ait örnekleri bu yazının beraberinde bulacaksınız. Size bu programda Biyokimya parametreleri için 2 seviye 2’şer ml ve Glukoz testi için 2 seviye 1’er mL olmak üzere toplam 4 Adet Serum örneği gönderilmiştir. Örneklerin stabilite ve homojenite çalışmaları yapılmıştır. Stabilite süresi: Oda ısısı 7 gün, +4 derece 7 gün.

Numuneler elinize ulaştıktan sonra buzdolabında dondurmadan muhafaza ediniz. Çalışma öncesinde numuneleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletin ve çalkalamadan, köpürtmeden, alt-üst ederek tamamen homojen hale gelmesini sağlayınız. Çalışma öncesi örnekleri santrifüj ediniz.

Kalite kontrol programından arzu edilen yararların temin edilebilmesi için, örnekler laboratuvara gelen herhangi bir hasta örneği gibi çalışılmalı, analitik işlemler açısından hiçbir farklılık yapılmamalıdır.

Metot ve teknikler arasındaki farkı en aza indirmek ve olası dilüsyon hatalarını engellemek amacıyla örnekler liyofilizasyon işlemine tabi tutulmamıştır. Biyolojik kökenli bütün örnekler gibi, bu örneklerin de tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, gereken titizlik gösterilmelidir.

Program kapsamındaki testler ve birimleri içeren sonuç listesi 2. sayfada yer almaktadır. Sonuçların listede verilen birimler esas alınarak sisteme girilmesi gerekmektedir.

Program kapsamında elde edilen neticelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında yararlı olabileceği düşünüldüğünden, katılımcı laboratuvarların analiz neticeleri ile birlikte, raporlarında kullandıkları referans aralıkları da belirtmeleri istenmektedir.

Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgi gözden geçirilmeli ve meydana gelen değişiklikler işlenmelidir. Neticelerin değerlendirilmesi ve laboratuvarların gruplanması açısından büyük önem taşıdığından, özellikle metot, kit ve referans aralık değişikliklerinin işlenmesine özen gösterilmelidir.

NOT: Sonuçlarınızı aşağıda belirtilen tarihler arasında girmeniz gerekmektedir. Bu süreler içinde sonuç girilmemesi halinde rapor oluşturulmayacaktır. “GEÇ RAPOR” uygulamamız kaldırılmıştır.

Çalışma süresi dolan numuneler, biyolojik kökenli olduğundan “ Tıbbi Atıkların Yönetmeliği” kapsamında bertaraf edilmelidir.

Örnek gönderim tarihi	: 8 Ekim 2019
Çalışma tarih aralığı	: 9 Ekim 2019 – 15 Ekim 2019
Sonuç girişi için son tarih ve saat	: 18 Ekim 2019 saat 17:00
Son kullanma tarihi	: 15 Ekim 2019

Son sonuç girişi tarihinden itibaren sisteme sonuç girişi yapılamayacaktır.

Son giriş tarihine kadar sonuçlarınızı revize edebilirsiniz.

BİYOKİMYA (B-19)SONUÇ KAYIT LİSTESİ

TEST PARAMETRESİ	BİRİMİ	SONUÇ	
		B-19-10-01	B-19-10-02
HDL-KOLESTEROL	mg/dL		
KALSİYUM	mg/dL		
TOTAL KOLESTEROL	mg/dL		
KREATİNİN	mg/dL		
ALBUMİN	g/L		
ALKALEN FOSFATAZ	U/L		
BİLİRUBİN (TOTAL)	mg/dL		
FOSFOR	mg/dL		
GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)	U/L		
PROTEİN (TOTAL)	g/L		
SGOT (AST)	U/L		
SGPT (ALT)	U/L		
TRİGLİSERİT	mg/dL		
ÜRE	Üre = BUN * 2.14 mg/dL		
ÜRİK ASİT	mg/dL		
DEMİR	µg/dL		
DEMİR BAĞLAMA (TOTAL)	µg/dL		
SODYUM	mEq/L		
POTASYUM	mEq/L		
KLOR	mEq/L		
LDH	U/L		
DİREK BİLİRUBİN	mg/dL		
KREATİN KİNAZ	U/L		
AMİLAZ	U/L		
MAGNEZYUM	mg/dL		
TEST PARAMETRESİ	BİRİMİ	SONUÇ	
		B(glukoz)-19-10-01	B(glukoz)-19-10-02
GLUKOZ	mg/dL		

Web sayfası üzerinden veri girişinde sistem virgülden sonra 2 rakam girişine izin vermektedir.

Bu form, internette veri girişi sırasında size kolaylık sağlaması için düzenlenmiştir.

Lütfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri faksamayınız, göndermeyiniz.

SONUÇ GİRİŞİ:



www.labpt.com.tr

Web Sitesi Kullanım Kılavuzu İçin

