

## Numune Çalışma ve Saklama Talimatı (Romatoid Panel)

Sayın Katılımcı,

Size bu grupta romatoid markerlar için **2 Adet 1'er mL Serum örneği** gönderilmiştir. Örneklerin stabilite ve homojenite çalışmaları yapılmıştır.

Numuneler elinize ulaştıktan sonra buzdolabında dondurmadan muhafaza ediniz. Çalışma öncesinde numuneleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletin ve çalkalamadan, köpürtmeden, alt-üst ederek tamamen homojen hale gelmesini sağlayınız.

Kalite kontrol programından arzu edilen yararların temin edilebilmesi için, örnekler laboratuvara gelen herhangi bir hasta örneği gibi çalışılmalı, analitik işlemler açısından hiçbir farklılık yapılmamalıdır.

Metot ve teknikler arasındaki farkı en aza indirmek ve olası dilüsyon hatalarını engellemek amacıyla örnekler liyofilizasyon işlemine tabi tutulmamıştır.

Biyolojik kökenli bütün örnekler gibi, bu örneklerin de tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, gereken hassasiyet gösterilmelidir. Örnekler virüs inaktivasyonu için ultraviyole ışınına tabii tutulmuştur. Ancak olası enfeksiyon riski için çalışma sırasında iyi laboratuvar pratiği uygulamaları dikkate alınmalıdır.

Örneklerden çalışılarak neticeleri bildirilecek parametreler ekteki listede belirtilmektedir. Neticelerin listede verilen birimler kullanılarak girilmesi gerekmektedir.

Program kapsamında elde edilen neticelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında yararlı olabileceği düşünüldüğünden, katılımcı laboratuvarların analiz neticeleri ile birlikte, raporlarında kullandıkları referans aralıkları da belirtmeleri istenmektedir.

Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgiyi gözden geçirilmeli ve meydana gelen değişiklikler işlenmelidir. Neticelerin değerlendirilmesi ve laboratuvarların gruplanması açısından büyük önem taşıdığından, özellikle metot, kit ve referans aralık değişikliklerinin işlenmesine özen gösterilmelidir.

---

<b>Örnek gönderim tarihi:</b>	<b>12 Kasım 2019</b>
<b>Çalışma süresi:</b>	<b>13 Kasım 2019 – 19 Kasım 2019</b>
<b>Sonuç girişi için son tarih:</b>	<b>22 Kasım 2019 saat 17:00</b>
<b>Son kullanma tarihi:</b>	<b>19 Kasım 2019</b>
<b>Referans Aralığı:</b>	<b>40 yaşındaki erkekler için verilmelidir.</b>

---

## R-19 Program İeriđi

TEST PARAMETRESİ	Birim	SONU	
		R-19-11-01	R-19-11-02
ASO	IU/mL		
CRP	mg/L		
Romatoid faktör	IU/mL		

Bu form, internetten veri giriři sırasında size kolaylık sađlaması iin dzenlenmiřtir. Ltfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri fakslamayınız, gndermeyiniz.

**SONU GİRİŐİ**



[www.labpt.com.tr](http://www.labpt.com.tr)

**Web Sitesi Kullanım Kılavuzu İin**

