



Numune Çalışma ve Saklama Talimatı (TORCH Paneli)

Sayın Katılımcı,

Programa ait örnekleri bu yazının beraberinde bulacaksınız. Size bu grupta TORCH paneli için **2 Adet 1'er mL Serum örneği** gönderilmiştir. Örneklerin stabilite ve homojenite çalışmaları yapılmıştır.

Numuneler elinize ulaştıktan sonra buzdolabında dondurmadan muhafaza ediniz. Çalışma öncesinde numuneleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletin ve çalkalamadan, köpürtmeden, alt-üst ederek tamamen homojen hale gelmesini sağlayınız.

Kalite kontrol programından arzu edilen yararların temin edilebilmesi için, örnekler laboratuvara gelen herhangi bir hasta örneği gibi çalışılmalı, analitik işlemler açısından hiçbir farklılık yapılmamalıdır.

Metot ve teknikler arasındaki farkı en aza indirmek ve olası dilüsyon hatalarını engellemek amacıyla örnekler liyofilizasyon işlemine tabi tutulmamıştır.

Biyolojik kökenli bütün örnekler gibi, bu örneklerin de tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, gereken hassasiyet gösterilmelidir. Örnekler virüs inaktivasyonu için ultraviyole ışınına tabii tutulmuştur. Ancak olası enfeksiyon riski için çalışma sırasında iyi laboratuvar pratiği uygulamaları dikkate alınmalıdır.

Örneklerden çalışılarak neticeleri bildirilecek parametreler ekteki listede belirtilmektedir. Neticelerin listede verilen birimler kullanılarak girilmesi gerekmektedir.

Program kapsamında elde edilen neticelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında yararlı olabileceği düşünüldüğünden, katılımcı laboratuvarların analiz neticeleri ile birlikte, raporlarında kullandıkları referans aralıkları da belirtmeleri istenmektedir.

Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgiyi gözden geçirilmeli ve meydana gelen değişiklikler işlenmelidir. Neticelerin değerlendirilmesi ve laboratuvarların gruplanması açısından büyük önem taşıdığından, özellikle metot, kit ve referans aralık değişikliklerinin işlenmesine özen gösterilmelidir.

NOT: Sonuçlarınızı aşağıda belirtilen tarihler arasında girmeniz gerekmektedir. Bu süreler içinde sonuç girilmemesi halinde rapor oluşturulmayacaktır. "GEÇ RAPOR" uygulamamız kaldırılmıştır.

Örnek gönderim tarihi	: 08 Ekim 2019
Çalışma süresi	: 09 Ekim 2019 – 15 Ekim 2019
Sonuç girişi için son tarih	: 18 Ekim 2019 saat 17:00
Son kullanma tarihi	: 15 Ekim 2019
Stabilite süresi	: Oda ısısı 7 gün, +4 derece 7 gün
Referans aralığı	: <u>40 yaşındaki erkekler</u> için verilmelidir.

Son sonuç girişi tarihinden itibaren sisteme sonuç girişi yapılamayacaktır.

Son giriş tarihine kadar sonuçlarınızı revize edebilirsiniz

T-19 Program İerięi

TEST PARAMETRESİ	SONU	
	T-19-10-01	T-19-10-02
Toksoplazma IgM		
Toksoplazma IgG		
Rubella IgM		
Rubella IgG		
CMV IgM		
CMV IgG		

Sonuların “Pozitif” veya “Negatif” olarak girilmesi yeterlidir.

Bu form, internetten veri giriři sırasında size kolaylık saęlaması iin dzenlenmiřtir. Ltfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri fakslamayınız, gndermeyiniz.

SONU GİRİřİ



www.labpt.com.tr

Web Sitesi Kullanım Kılavuzu İin

